



Attention : Les établissements ouverts de 02H00 à 07H00 du matin doivent obligatoirement être équipés d'ethylotests.



Ethylotest sans ballon fabriqué en France

Ethylotest homologué pour les véhicules, équipez-vous à Petit Prix !

Caractéristiques de cet ethylotest :

- Ethylotest avec **certification NF X20-702:2014 AFNOR** et **décret français 2015-775** du 29 juin 2015. Conforme à la **règlementation REACH**.
- Ethylotest chimique avec **homologation du Ministère de la Santé**.
- Jetable à usage unique.
- Ethylotest **facile et rapide à utiliser**.
- Seuil de détection : **0.25mg/l d'air expiré et 0.5g/l de sang**.

Comment fonctionne cet ethylotest?

- Le tube bleu et jaune contient des substances réactives (voir photo).

1- Réchauffer entre vos mains l'éthylotest pendant 15 secondes.

2- Perforer en pressant les 2 embouts blancs perforant la membrane aluminium.

3- Souffler. La personne contrôlée doit souffler en tenant l'éthylotest dans sa bouche de manière à toujours voir la pastille rouge. Inspirer profondément puis souffler lentement en une seule fois jusqu'à ce que la pastille devienne blanche.

4- Constater la coloration du tube:

- Attendre que la pastille redevienne rouge.

- Si la coloration verte n'atteint pas l'anneau noir : **Taux entre 00 et 0.5g/l.**

- Si la coloration verte atteint ou dépasse l'anneau noir : **Taux supérieur ou égal à 0.5g/l.** La conduite des véhicules est interdite !

Si vous cherchez un éthylotest jeune conducteur 0.2g/l, voici l'**éthylotest** qu'il vous faut !

Toutes les informations sur la réglementation sont sur la **page de la sécurité routière.**

Retrouvez l'éthylotest dans **pack de secours voiture** et dans le **pack voyages et vacances.**